




Att göra blodutstryk

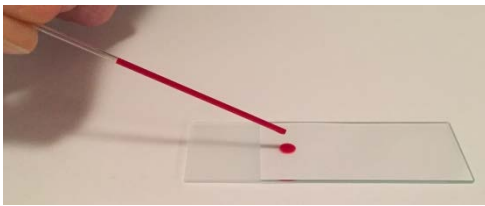


1. Placera en liten droppe välblandat EDTA-blod på ena änden av ett objektsglas.

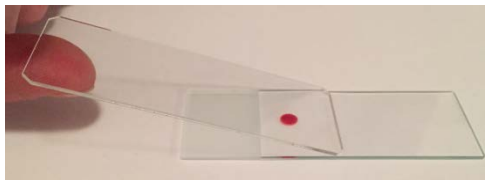

2. Sätt ett täckglas framför bloddroppen med ca 40° lutning.

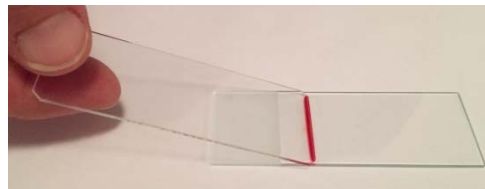

3. Dra täckglaset bakåt, in i bloddroppen, så att blodet flyter ut längs täckglasets kant.

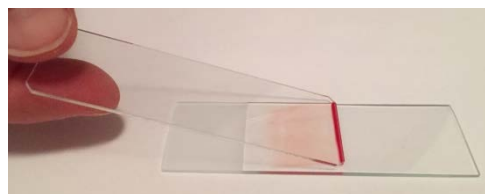

4. Skjut täckglaset framåt över objektsglaset med en stadig och jämn handrörelse.



5. Låt preparatet torka snabbt genom att vifta det i luften. Skriv patientens ID-uppgifter med blyerts på glasets märkyta.